

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАДЕВАНИЮ

Надевайте компрессионный трикотаж утром сразу после пробуждения и гигиенических процедур. Перед тем, как надевать или снимать изделие, рекомендуется снять кольца, браслеты и часы. Чтобы не повредить трикотаж заострёнными ногтями, рекомендуется надеть резиновые перчатки.



- 1.** Возьмите за пятку изнутри изделия.



- 4.** Постепенно тяните изделие вверх и распределяйте его так, чтобы не было складок.



- 2.** Выверните изделие наизнанку до пятки.



- 5.** Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по вашей ноге.



- 3.** Осторожно наденьте изделие на ступню. Убедитесь, что пятка и мысок изделия правильно расположены на ноге.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Компрессионный трикотаж следует стирать ежедневно вручную или в стиральной машине в деликатном режиме при температуре не выше 40°C. Используйте моющие средства для цветного белья, не содержащие смягчителей или отбеливателей.

- ◆ После стирки прополощите компрессионное изделие, аккуратно отожмите его руками не выкручивая.
- ◆ Для сушки разложите изделие на ровной горизонтальной поверхности вдали от источников тепла.
- ◆ Не сушите влажные изделия на отопительной батарее.
- ◆ Не оставляйте влажные изделия лежать под прямыми солнечными лучами.
- ◆ Компрессионный трикотаж нельзя гладить.
- ◆ Химическая чистка запрещена.



ВАЖНО

Длинные заострённые ногти, кольца, браслеты, часы могут повредить компрессионное изделие.

Поэтому, прежде чем надевать, снимать или стирать изделие, необходимо снять часы и украшения с рук, и при необходимости, надеть резиновые перчатки.

При возникновении вопросов по качеству изделия обратитесь к вашему врачу.